


*No. 1 choice
of hospitals
& mothers*

SpecialNeeds® Smokk

Kort veiledning

Viktig

Før første gangs bruk skal membranen løsnes fra ventilplaten. Rengjør og steriliser alle delene, for eksempel ved å koke dem i 3–5 minutter eller autoklavere dem. Smokken er et produkt som utsettes for slitasje, og den må skiftes ut når det er nødvendig, f.eks. hvis melkestrømmen blir for stor når multispalten (se «Slik fungerer multispalten») står vannrett eller multispalten er skadet på kantene.

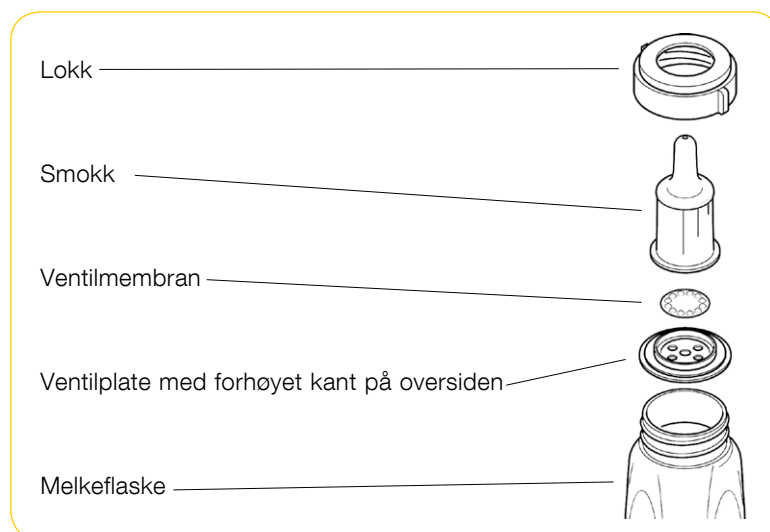


Sette sammen

- 1 Plassér membranen på ventilplaten (oversiden), slik at knotten kommer helt gjennom hullet i midten.
- 2 Fyll ønsket mengde melk i flasken.
- 3 Plassér ventilen over åpningen på flasken. Pass på at membranen og den forhøyede kanten på ventilplaten vender opp.
- 4 Plassér smokken over ventilplaten, og skru alle delene sammen med lokket.


Fyll smokken

- 1 Hold flasken loddrett, og trykk luften ut av smokken.
- 2 Fortsett å trykke, og snu flasken opp-ned.
- 3 Slipp opp trykket, og melk vil renne inn i smokken.
- 4 Gjenta noen ganger til smokken er helt full.

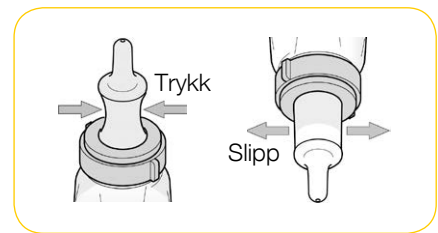


Kontroller væskemengden

Smokken har en åpning med en multispalte som kan tilpasses barnet. De tre strekene på smokken viser væskemengden; den lange streken for maksimal mengde, den midterste streken for middels mengde og den korte streken for minimumsmengde.

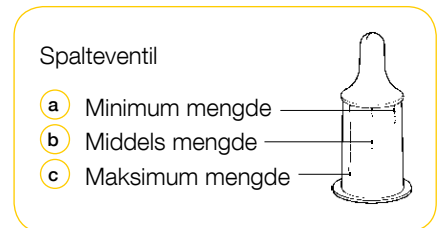

Slik fungerer multispalten

- a Spalten står horisontalt
Trykket holder multispalten lukket for minimum mengde.
- b Spalten står diagonalt
Multispalten åpnes delvis for middels mengde.
- c Spalten står loddrett
Trykk åpner multispalten for maksimum mengde.

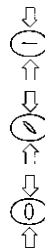

Rengjøring og sterilisering

Før første gangs bruk og deretter én gang daglig

Etter at delene til tåteflasken er tatt fra hverandre, bør de kokes i 5 minutter. For å unngå kalkrester (som ellers vil hindre at ventilen fungerer som den skal) anbefales bruk av destillert vann. Alle delene er egnet for rengjøring i oppvaskmaskin. Ved bruk på sykehus kan alle delene autoklaveres ved 134 °C i 3 minutter eller ved 125 °C i 15 minutter.

For å unngå at delene skades under sterilisering må man passe på at de ikke utsettes for trykk utenfra.

SpecialNeeds må alltid rengjøres etter bruk. Hvis det fortsatt er melk i smokken etter bruk, tøm melken ut i en utslagsvask. Ta SpecialNeeds fra hverandre og skill membranen fra ventilplaten. Rengjør samtlige deler grundig i varmt såpevann, og skyll med kaldt vann. La delene tørke på et tørt, rent håndkle.

Merk: Denne korte veiledningen erstatter ikke standardveiledningen, REF 190.1059 og  0123

Local contact:

Medela Medical Norge
Rosenholmveien 25
1414 Oslo, Norge
Tlf. 477 777 17
Faks 668 099 13



Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com